

I Sterilit® – Huile d'entretien


- A base d'huile blanche de paraffine
- Ne contient pas de silicone
- Validé pour les procédés de stérilisation à la vapeur selon la norme ISO 17665 -1*

*ISO 17665-1 : Stérilisation des produits de santé-chaueur humide

**Cf. : Notice d'utilisation JG600 et JG598

II Propriétés

- Effet lubrifiant et protecteur contre la corrosion due au frottement
- Le film d'huile n'altère pas l'effet de la stérilisation, même dans les zones difficiles d'accès

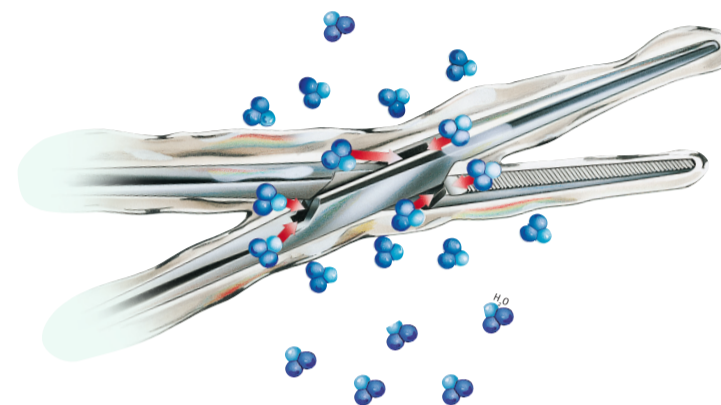

III Conservation et précaution d'emploi**

- A utiliser avant la stérilisation
- Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière
- Ne pas utiliser après la date limite de conservation
- Nettoyer l'instrument à huiler selon ses instructions d'utilisation, avant l'application de Sterilit®

IV Application

- Huiler brièvement les articulations ouvertes des instruments avant le contrôle de fonctionnalité et la stérilisation
- Pour les endroits difficiles d'accès, utiliser Sterilit® avec embout (JG600)
- Diffuser l'huile Sterilit® directement sur la zone de l'articulation
- Répartir l'huile de manière homogène en ouvrant et en fermant l'instrument à plusieurs reprises
- Eliminer l'huile en excès avec un chiffon non pelucheux



JG600

JG598

JG600 STERILIT®

Huile Aesculap d'entretien, en flacons pressurisés, avec deux diffusions (avec ou sans embout). Pour la lubrification des instruments de chirurgie avant la stérilisation.

JG598 STERILIT®

Huile Aesculap d'entretien, en compte-gouttes pour la lubrification avant la stérilisation des instruments, joints, arrêts, etc.

